

ENDODRY™

Tørke- og lagringssystem

Tørking og lagring



EN HØYERE STANDARD FOR TØR KING OG LAGRING AV ENDOSKOPER

SØRG FOR AT DE FLEKSIBLE ENDOSKOPENE DINE FORBLIR TØRRE OG SIKRE UNDER LAGRING

Tørke- og lagringskabinettet tvinger kontinuerlig HEPA-filtrert luft gjennom alle endoskopkanaler, slik at endoskopet blir tørt og væskefritt.

- Kontinuerlig ventilasjon fjerner rester av fukt som kan føre til bakterievekst
- Sirkulering av tørr, instrumentklassifisert, filtrert luft gjennom hver endoskopkanal og rundt den ytre hylsen sikrer at endoskopet er tørt før bruk
- Den korte tørkesyklusen forbedrer endoskopets omløpstid

BESKYTT FLEKSIBLE ENDOSKOPER MOT SKADE

Kassettsystemet hindrer fri bevegelse av distalspissen, og beskytter endoskopet under transport og lagring.

- Transportering av fleksible endoskoper i kassetter reduserer endoskopskader og tilknyttede reparasjoner med 25-30 %
- Rask og effektiv overføring fra automatisert endoskoproprocessor til lagringskabinett gjennom kassettsystemet

KAN TILPASSES INSTITUSJONENS BEHOV

Plassbevisst design tilgjengelig i en rekke konfigurasjoner, slik at den passer til kravene til enhver institusjon.

- Fås i ensidige og gjennomgående modeller (front- og baktør), for adskilling av våte og tørre områder
- Kompatibelt med ADVANTAGE PLUS™ reprocessor-tilkoblingsblokker for å øke avdelingens effektivitet

MAKSIMER PASIENTSIKKERHET

Tørke- og lagringskabinettet bruker kassetter til å minimere berøring og mulig rekontaminering.

- Redusert håndtering av endoskop minimerer rekontaminering og optimerer infeksjonskontroll
- Ved å unngå frakobling og gjentilkobling av endoskopkanaler til tilkoblingsblokker er du sikret riktig tilkobling, samtidig som du sparer tid
- SMART-lys (grønt, blått, rødt) for rask kabinettstatusidentifisering

DATAADMINISTRERING SIKRER SAMSVAR MED ENDOSKOPETS TØR KESYKLUS

Kontinuerlig dataovervåkning gir detaljert informasjon om tørkestatusen for alle endoskoper.

- Kontinuerlig luftsirkulasjon kontrollerer kabinettets temperatur og luftfuktighet
- Strekkodeskanner gjør det lettere å lokalisere endoskop-ID og endoskopbrett; berørings skjermen sikrer rask visualisering
- SMART Connect-datagrensesnitt med with ADVANTAGE PLUS-reprocessor og CANEXIS™ springssystemløsning for integrert arbeidsflyt



DEN KOMPLETTE BESKYTTELSESSYKLUSEN

Som en global banebryter innen forebygging av infeksjoner er **Cantel Medical den eneste som leverer den komplette beskyttelsessyklusen**, et fullverdig, proaktivt partnerskap dedikert til å hjelpe deg med å eliminere risiko, effektivisere arbeidsprosessen og optimere suksessen din.

ENDODRY™

Tørke- og lagringssystem

Fargeberørings skjerm
for rask identifisering av
endoskoplagringstid



SMART-tilkobling til
ADVANTAGE PLUS™
reprocessor og
CANEXIS™
programvare for
arbeidsflytadminis-
trasjon

Dørene kan låses
for å beskytte
endoskopbehold-
ningen

Tilgjengelig
med svingdør
mot venstre
eller høyre



Strekodeskanner for enklere
identifisering av endoskop og operatør



Kompatibel med ADVANTAGE PLUS
reprocessor-tilkoblingsbokker, hvilket
gjør avdelingen mer effektiv



Transportkassett for
endoskopbeskyttelse og
rekontaminasjonsforebygging

Gjennomgangs- og ensidige
modeller er tilgjengelig



Våt side

Tørr side

SPESIFIKASJONER FOR ENDODRY™ KABINETTET

Strømkrav

100-240 VAC, 50/60 HZ, Strømeffekt: 75 W,
Sikring: T2 A (innebygget enhet) 15 A (krets)

Sertifiseringer for elsikkerhet

IEC 61010-1:2010

Driftstemperatur

50 - 104 °F (10 - 40 °C)

Grensesnitt

RJ45 (10/100 Mbit)

Mål

75 H x 24 B x 22 D (tommer)
190 H x 60 B x 54 D cm
Svingdører 20,5 (tommer) 52 (cm)

Vekt

375 pund (170 kg)

Endoskopsporbarhet

CANEXIS™ programvare for
arbeidsflytadministrasjon

Luftkrav

(Se tekniske dokumenter)
Instrumentklassifisert luft


BESTILLINGSINFORMASJON FOR ENDODRY™-KABINETTET

| MODELLNUMMER | BESKRIVELSE |
|--|---|
| 15122, 15123, 15124, 15125** | ADVANTAGE PLUS™ AER – gjennomgangsmo- dell |
| 15120, 15121* | ADVANTAGE PLUS AER – ensidig inngang |
| DRY-2005, DRY 2006, DRY-2007, DRY-2008* | DSD AER-plattform – gjennomgangsmo- dell |
| DRY-1003, DRY-1004* | DSD AER-plattform – ensidig inngang |
| CAS-1000 | Endoskoptransportkassett i plast |
| 14558 | Endoskoptransportkassett i metall |

** Tilgjengelig med svingdør mot høyre eller venstre

*Tilkoblingsblokker selges separat.

ADVANTAGE PLUS™ og ENDODRY™ er varemerker som tilhører Medivators Inc.
CANEXIS™ er et varemerke som tilhører Cantel Medical Corp.

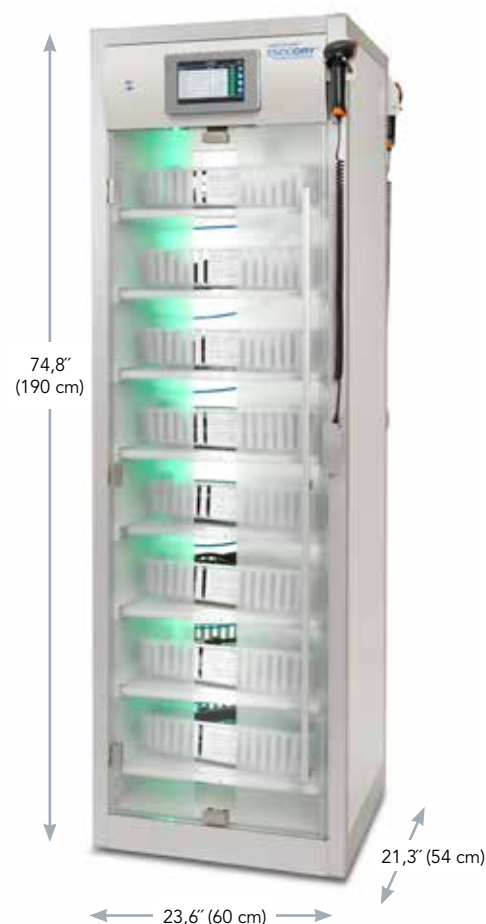

MEDIVATORS ER NÅ CANTEL

www.cantelmedical.eu

Medivators BV | tlf: +31 45 5 471 471 (kundeservice)

© 2020 Cantel Medical Corp. LIT-00322/A

